

2017年10月18日(第2版)
2014年8月11日(第1版)

器 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDNコード:70935000

届出番号:23B2X10023000237

ツイーザー

【禁忌・禁止】

1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状

- ① 先端部
- ② ハンドル部



2. 原材料

先端部:ステンレス鋼
ハンドル部:ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる器具をいう。

【性能及び安全性に関する規格】

小さな補綴物をクリップし、屈曲するときに使用。
先端部は曲と直がある。

【使用方法】

1. キズ、変形の有無などがないことを確認する。
2. ハンドル部を閉じ、先端部で対象物をクリップし保持や屈

曲作業をする。

【使用上の注意】

1. 落下に注意すること。
2. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:名南歯科貿易株式会社

住 所: 〒454-0805

名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

e-mail: meinan@meinandental.com

ホームページ: <http://www.meinandental.com>

製造業者: MEDENTA.

国名: パキスタン