

ポーセレンホルダー


【禁忌・禁止】

1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状

- ① 先端部
- ② ハンドル部
- ③ ピン

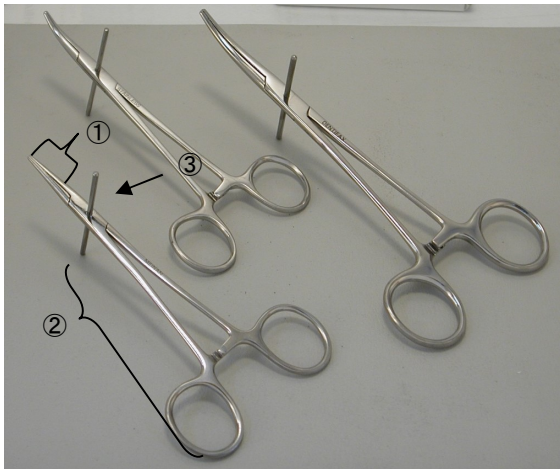

2. 原材料

- 先端部: ステンレス鋼
ハンドル部: ステンレス鋼
ピン: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の保持や屈曲等に用いる。

- ・小さな補綴物をクリップし・屈曲するときに使用。ピンでたてることができ、先端部で補綴物を保持しつつも、机上に置くことができる。
- ・ピンは切断して短くすることもできる。
- ・先端部は曲と直がある。

【使用方法等】

1. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
2. ハンドル部を閉じ、先端部で補綴物を保持したり、曲げたりできる。
3. ピンを使って机上に補綴物を保持したまま立てることができる。

【使用上の注意】

1. 落下に注意すること。
2. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: MEDENTA
パキスタン