

パラワックス

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



【使用目的又は効果】

ワックスパターンを軟化成形するために用いる歯科用器具。様々なサイズ及び形状の刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

サイズ【W:D:H】	65×50×125mm
重さ	450g
電圧	100V、50/60Hz
消費電力	4W
温度メモリ	0~10 MAX 60℃前後
ブロックアウトピン種類	0°, 2°, 4°, 6°

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

1. 電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
2. 接続ケーブルを本体に差し込みます。
3. 本体背面にある差し込みプラグを変換アダプタにてコンセントへ接続します。
4. シャンクをサベイヤーマリングマシンに取付けます。
5. 電源スイッチをONにします。LEDランプが点灯します。
6. 調節ノブで温度を調節します。
7. 使用後は必ず電源スイッチをOFFにして下さい。

【使用上の注意】

1. 機器を落下及び破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
2. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
3. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。
4. 設定により温度が上昇するため、ワックス以外は触れないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 本器は柔らかい布等で拭くこと。決して水洗いをしないこと。
3. 使用後は先端についたワックスをよく拭き取ること。ワックスが残ったままだと、加熱機能に不具合が生じる恐れがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: オボデント社

Obodent GmbH

ドイツ

取扱説明書を必ずご参照ください。