

アシガフラッシュ

【警告】

1. 定められた電圧、周波数以外では使用しないこと
(火災・感電の原因となる)
2. カバーを外した状態で使用しないこと。また、点灯中のライトを直視しないこと。
(火災ややけど、ライトの破損、また視力障害の原因となる)
3. 点灯中または消灯直後のライトや周囲に手指を触れないこと
(高温によるやけど、火災、機器の故障の原因となる)
4. 照射中及び照射直後に、お手入れやライトの交換を行わないこと。お手入れは必ず電源をOFFにすること。
(やけど、火災などの原因となる)
5. ヒューズが切れた場合は、電氣的に問題がある可能性があるため、速やかに修理点検を依頼すること。
(漏電などによる事故・故障の原因となる)
6. 使用目的に応じて使用すること。
(故障、事故の原因となる)

【禁忌・禁止】

1. 電磁波を生ずる機器の周辺に設置しない。
2. 本体に衝撃を与えたり、使用中又は使用直後に本体を動かさないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 構成

本体: スチール

	幅	高さ	奥行
内部【mm】	150	65	140
外側【mm】	245	100	215

3. 電気定格

電源: 100~240V、36W

周波数: 50/60Hz

【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置をいう。光を照射させて重合を行う。

重合可能材料: プラスレジン

重合時間: 約20分

【使用方法等】

1. コンセントに電源コードをさす
2. 重合する光重合型のレジン等を本体内部のトレーに置く
3. 電源をいれ、ライトを点灯させ重合させる。
4. 重合後は必ず電源を落とし保管する。

【使用上の注意】

1. 本製品使用後は必ず電源をOFFにすること。
2. 本製品は周囲に十分なスペースがあるところに設置すること。
3. ライトは直接手指で触れないこと。表面に油分や汚れが付着するとライトの破損や破裂の原因となります。
4. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- 直射日光の当たらない場所で保管すること。
- 本体や電源コードなどにホコリの付着がないようにすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: ASIGA社

オーストラリア

取扱説明書を必ずご参照ください。