

フェルトホイール

【禁忌・禁止】

1. 使用中は、過度の圧力を加えたり、過度の駆動回転を与えたりしないこと。
2. キズ、めくれ、その他の損傷が認められるものは使用しないこと。
3. 歯科用以外の用途には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



1. 成分

フェルト

2. サイズ、色

色: ホワイト

【サイズ1】ハード

直径	25.4mm
厚さ	3.1mm

【サイズ2】ミディアム

直径	25.4mm
厚さ	0.7mm

【サイズ3】ソフト

直径	25.4mm
厚さ	6.3mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的・用途

歯科技工用マイクロモーター、或いは歯科技工用エンジンを使ったハンドピースに装着し、回転させることにより歯科用補綴物の研削、切断を行うもの。

2. 使用する器械の種類

- 歯科技工用マイクロモーター
- 歯科技工用ハンドピース

性能: 金属の鏡面仕上げに効果を発揮します。

表面が柔らかく研磨力が弱い為、研磨剤等を塗りこんで研磨を実施するとよい。

【使用方法等】

1. 歯科技工用マイクロモーター或いは歯科技工用エンジンを使ったハンドピースに当ジスクを装着する
2. マイクロモーター及びハンドピースをONにし、回転させる。
3. 歯科用補綴物等に当ジスクを当て、研削/切断を行う。

【使用上の注意】

1. 使用する回転器具(マイクロモーター、ハンドピース等)の添付文書や仕様説明書を熟読したあと、正しく回転器具に装着すること。
2. 使用する前に、当ジスクが緩み無く、正しく固定装着されているかを確認すること。
3. 使用する前に、目を保護するための防護用ゴーグル(防護メガネ)を必ず使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 低温・低湿度の風通しの良い場所に保管すること。
2. 児童の手の届かない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社

Keystone Industries

アメリカ合衆国