

デンタグラフ

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



【使用目的又は効果】

ワックスパターンを軟化成形するために用いる歯科用器具。様々なサイズ及び形状の刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

性能: サペイング・ワックストリミングの双方が可能

規格:

サイズ【W:D:H】	250×200×370mm
重さ	4kg
電圧	100V、50/60Hz

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

ワックストリミングを実施する場合

1. トグルスイッチを正面からみて左に入れるとコントロールランプが点灯し、ブロックアウトピンが熱せられます。
2. 調整ノブを右方向に回転させ、温度を中程度まで上げます。
3. 調整ノブを使用しブロックアウトピンを使用し、ワックスを溶かすことなく、プラスチック状のまま取り出せる温度に微調整します。コントロールランプの明るさは温度の高さを示します。
4. 作業終了後は、トグルスイッチを右に入れてオフにします。

【使用上の注意】

1. 機器を落下及び破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
2. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はずみやかに中止すること。
3. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 本器は柔らかい布等で拭くこと。決して水洗いをしないこと。
3. 使用後は先端についたワックスをよく拭き取ること。ワックスが残ったままだと、加熱機能に不具合が生じる恐れがあります。
4. 耐用年数: 6年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: オボデント社

Obodent GmbH

ドイツ

取扱説明書を必ずご参照ください。