

器 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット JMDNコード: 35079001

## エンドファイルホルダー

### 【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 成分

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

ファイル等を当ピンセットで挟んで使用する。

### 【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。
3. ハンドル部を保持し、先端部を閉じることでファイルを保持し作業を行う。

### 【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。
5. 当ピンセットにファイルを挟み、ファイルがしっかりと保持されていることを確認すること。
6. 当ピンセットで装着できない、ファイルは使用しないこと。

全長サイズ: 155mm

ホールド部直径: 2mm±0.5mm

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

※乾燥について

熱を利用した乾燥機による乾燥は行わないでください。  
送風もしくは布等で軽く押し当て乾燥させてください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG  
ドイツ