

器 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDNコード: 35079001

エンドファイルホルダー

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 成分

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ファイル等を当ピンセットで挟んで使用する。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。
3. ハンドル部を保持し、先端部を閉じることでファイルを保持し作業を行う。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。
5. 当ピンセットにファイルを挟み、ファイルがしっかりと保持されていることを確認すること。
6. 当ピンセットで装着できない、ファイルは使用しないこと。

全長サイズ: 155mm

ホールド部直径: 2mm±0.5mm

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

※乾燥について

熱を利用した乾燥機による乾燥は行わないでください。
送風もしくは布等で軽く押し当て乾燥させてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohler Medizintechnik GmbH

ドイツ