

パターンシリンジ

【禁忌・禁止】

1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
3. 口腔内では、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 成分

ジェル: アクリレート、ワックス、光開始剤

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製の光重合用キャスト用ジェル

収縮率: 0.05%

【使用方法等】

前準備

- ・ 模型(石膏・プラスチック・金属等)に分離剤を薄く塗布して下さい。

シリンジ使用時

- ・ シリンジの蓋を取り外す
- ・ シリンジの先端に注入ノズルを取り付ける
- ・ シリンジを軽く振りながら、ピストンを押し出しながらジェルを出して使用する

重合

- ・ 光重合器で重合させます。

重合時間

UV ライト(36W)タイプ: 3分

重合時発熱温度(参考値)

[室温 25°C]

シリンジタイプ: 68°C

【使用上の注意】

- ・ 研磨作業などを行う際は、かならず技工用デスクで行い、適切なダストコントロールを行うこと。
- ・ 重合後、模型より取り外す時は、パターンを十分に冷却してください(急冷も可能)
※放冷、水冷、冷却スプレー

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、冷暗所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・ 必ず蓋や栓をして保管すること
- ・ 保管温度: -5~60°C

【保守・点検に係わる事項】

- ・ 使用後は、速やかに蓋や栓をすること。
- ・ 直射日光にあてないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: 株式会社東永