

# ピンセット

## 【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

### 1. 形状



### 2. 材質

ステンレス鋼、SUS420J1 (DLC コーティング有)

### 3. サイズ

- ・ 127±1,5 mm
- ・ 180±1,5 mm

## 【使用目的又は効果】

保持する物体を閉じて挟む 2 枚の刃をもつ手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセット及び手術用ツイーザーが含まれる。

本品を手指によって操作する時、先端が適切に閉じること。

## 【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。
3. ハンドル部を保持し、先端部を閉じることで対象物を保持する。

## 【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

## 【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

＜オートクレーブ＞

温度: 134～137℃

4 分以上

乾燥 10 分以上

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohler Medizintechnik GmbH

ドイツ