

デンタルシザー

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ステンレス DIN1.4117 (TiAIN コーティング有)

3. サイズ

115±3 mm

【使用目的又は効果】

通常、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃(通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある)からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。歯科手術用に特別に設計された器具をいう。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
3. ハンドル部を閉じ、先端部で対象物を切断する。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

<オートクレーブ>

温度: 134~137°C

4分以上

乾燥 10分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohler Medizintechnik GmbH

ドイツ