

器 63 歯科用ブローチ  
一般医療機器 歯科用クレンザ JMDNコード: 35784000

## ガッタパーチャリムーバー

### 【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 成分

先端: ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

根管に穴を形成・拡大したり、又は抜髄を行うために用いる  
先細で刃付きの長い歯科用切断器具。

性能: 作業部(long version), (short version)

ELESサイズ

#ELES: 先端(ダイヤモンドコート)

#EGPR: 先端に除去用鈎有

### 【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
3. ガッタパーチャの除去を行う。

### 【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。
5. 作業部先端は細く両頭で、作業時裂傷の恐れがある為、注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし  
た後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅  
菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG  
ドイツ