

器 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 JMDNコード: 70680000

コンポジットインスツルメント

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 成分

先端部: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆草剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる再使用可能な手用器具をいう。ただし「歯科用圧入充填器」に該当するものを除く。

性能: 先端の形状を用いて、専用材料を移動・合成(混ぜ合わせ)することが可能。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
3. 先端部を使って、レジンなどを充填、塗布する

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
ドイツ