

シェーラ ポル

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



成分: 二酸化ケイ素他

【使用目又は効果】

使用目的
義歯の研磨を行う材料。

カラー: ホワイト・グリーン・ピンク・ブラウン
容量: 100g 棒状

【使用方法等】

研磨器具に本材を適量塗布し、研磨作業を行う。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従事者のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材を使用する際は、粉塵による人体への影響を避ける為、マスク及び集塵装置を使用して粉塵を吸い込まないように注意すること。
4. 本材を目に入れないように注意すること。
5. 本材は単回使用である。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 保管温度: 12℃~28℃の環境下で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL : 052-799-4075

FAX : 052-353-6610

製造業者: シェーラ社

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
ドイツ