

レプリシル 17N

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



成分: ポリジメチルシロキサン

カラー: ブルー

【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【性能】

混合比率 (ベース: キャタリスト): 1:1

混合時間: 7分

硬化時間: 25~30分

ショア硬度A: 17

引張強度: 3.1 N/mm²

*上記時間は、作業環境が23℃の場合。

【使用方法等】

- ①. 使用する模型を乾燥させ、油脂などの汚れがないようにしておきます。
- ②. 使用前にベースとキャタリストのボトルをよく振ってから、ミキシングボウルなどで、1:1の割合で十分に練和します。
- ③. 模型が固定されたフラスコ等へ、練和した練和物を注入します。作業時間と硬化時間を守ることで、最適な結果を得ることができます。
- ④. 使用後は、必ずキャップの栓をしめてください。

【使用上の注意】

- ①. 本材は、記載の用途以外では使用しないこと。

- ②. 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ③. 本材、又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石けんでよく洗浄すること。
- ④. 本材が万一眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ⑤. 本材に対して、発疹や皮膚炎などの症状があらわれた使用者は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けて下さい。
- ⑥. 本材は、換気の良い作業所で使用すること。
- ⑦. 他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

- ①. 本材は、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ②. 本材は、歯科の従事者以外が触れることのないよう適切に保管・管理すること

保管: 4~30℃

使用期間: 2年 (有効期限はパッケージを確認下さい)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **名南歯科貿易株式会社**

住所: 名古屋市 中川区 舟戸町 2番 26号

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: シルコニック社

SILCONIC GmbH & Co., KG
ドイツ