

## パットカム ワイヤレス

### 【警告】


- 必ず専用のレンズカバーを取り付けて使用すること。(感染予防、損傷による部品の誤飲防止の為)
- レンズカバーは使用前、破れていないことを確認すること。
- 使用中、カメラ先端を患者が強く噛まないように注意すること。

### 【禁忌・禁止】


- レンズカバーは、患者ごとに交換し、繰り返し使用しないこと。(再使用禁止)

### 【形状・構造及び原理等】

主な構成

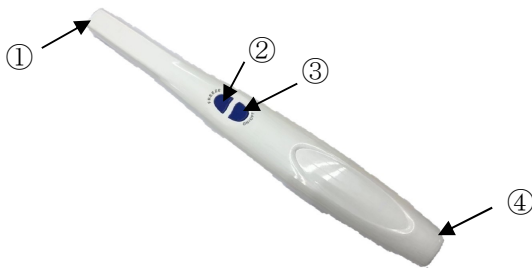

- ① レンズ
- ② シャッター/保存
- ③ パワー (ON/OFF)
- ④ USB 電源プラグ

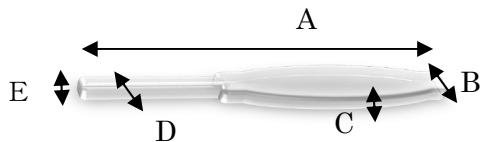

寸法 : (A×B×C×D×E) : (20.5×2.5×2.0×1.2×1.0 cm)

重さ : 50 g

解像度 : 1280×720pixel

性能 : オートフォーカス機能

ライト : 6pcs 白色 LED

### 【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する装置。

### 【使用方法等】

使用方法

- 携帯・タブレット端末の準備  
携帯・タブレット端末へ専用のソフトをインストールする。
- 本器の電源スイッチを2秒間押します。緑のランプが点きます。8秒後レンズのライトが光ります。
- 携帯・タブレット端末と本器の Wifi をコネク特させます。
- 接続完了後、撮影箇所(口腔内)を撮影・記録します。

### 【使用上の注意】

- 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
- 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時は、機器の作動はすみやかに中止すること。
- 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱いをしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意して保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 名南歯科貿易株式会社

TEL : 052-799-4075

FAX : 052-353-6610

製造業者 : MLG Medical Instrument (Shenzhen) CO., LTD  
中華人民共和国