

フリープリント ジンジバ

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起こる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者にはしやしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



【使用目的又は効果】

1. 使用目的

専用の3Dプリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、主に歯肉形態の再現作成に用いる。

主成分

1,2-エタンジオール 1-アクリラート	25～30%
2-(N-ブチルカルバマート)	
メタクリル酸ヒドロキシプロピル	15～20%
ウレタンジアクリレート	10～15%

カラー：ピンク

【使用方法等】

1. 専用3Dプリンターへ樹脂をセットします。
※専用トレーへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューターCAD上で設計されたデザインを3Dプリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
4. 本材は単回使用である。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
本容器蓋はしっかりと締めること。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5. 保管温度：摂氏15～28度

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社
 住 所： 〒454-0805
 名古屋市市中川区舟戸町2番26号
 TEL： 052-799-4075
 FAX： 052-353-6610

製造業者：Detax 社
 Detax GmbH & Co. KG
 ドイツ