

z S G レジン

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



【使用目的又は効果】

使用目的

専用の3Dプリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、主にサージカルガイド・トレー作成に用いる。

主成分：アクリル酸エステル・光開始剤・アクリラートモノマー・添加剤の混合物

カラー：アンバー（琥珀色）

【使用方法等】

1. 専用3Dプリンターへ樹脂をセットします。
※専用トレーへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューターCAD上で設計されたデザインを3Dプリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
4. 本材は単回使用である。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
本容器蓋はしっかりと締めること。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5. 保管温度：摂氏18～25度
6. 推奨保管期間：6ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

T E L : 052-799-4075

F A X : 052-353-6610

外国製造業者：Gold Array Technology LLC 社

製造先国名：中華人民共和国