

シャドーレスルーペ

【禁忌・禁止】

- 太陽や強力な光源を直視しないこと。(視力障害になる可能性があるため)

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造



①	ヘッドライト
②	ルーペ
③	テレスコープ
④	リチウム電池
⑤	充電器

【原理】

眼鏡レンズ部又は、眼鏡フレーム部に装着したルーペを通して作業野を拡大して観察する。

明るさ	5000K
満充電	3h(Max光度)、10h(Min光度)
重量	110g
レンズ	倍率最大: 1.5倍

	タイプ1	タイプ2
作業距離	30-40cm	25-65cm
拡大鏡	3.5-5.0倍	2.5-5.0倍

【使用目的又は効果】

歯科手術、検査、処置及び歯科技工作業時に術者の小型望遠鏡として機能し、作業野拡大像を得る。

【使用方法等】

1. 光源用のリチウム電池を充電させます。
2. 充電させた、リチウム電池をヘッドライトのバッテリーBOXに装着させます。
3. ライトをつける場合、ヘッドライトのスイッチを入れてライトをつけます。
4. テレスコープをヘッドライトに装着させます。※必要であれば、シールドレンズを取り付けます。
5. 装着感を確認し、ズレがないようにフィットさせます。
6. 補綴物などを利用し、焦点を合わせ、作業距離を確認します。

【使用上の注意】

1. 取扱説明書は参照すること。
2. テレスコープ・ルーペは推奨ものを使用すること。
3. テレスコープ・ルーペを使用し、太陽や光源の強いものを覗かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
2. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 耐用年数: 5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

外国製造業者: ShenZhen JinDaiFu Instrument co.Ltd

製造先国名: 中華人民共和国