

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
 一般医療機器 歯科技工用成型器 JMDN コード:70750010

デュナフォーム

【禁忌・禁止】

- ヒーター部は高熱に達する為、ハウジング部に直接触れると火傷の可能性がある。
- 当品の周囲には、可燃性のものは置かないこと。
- 電源コード接続時は必ずアースをとること。

【形状・構造及び原理等】

主な構成



規格

電源電圧	AC110V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	850W
サイズ	190×350×300 mm
重量	約 8.5kg

【使用目的又は効果】

マウスガード、スポーツガード、ブラキシズムスプリント、個人トレー等を製作する時に用いる装置。熱可塑性ジスクを加熱して軟化させ、石膏模型にかぶせて吸引することにより成形する。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 本体の電源コードの接続を行い、電源を入れる。
- (2) 準備した石膏模型を模型設置台の中心部に置く。
- (3) ジスクホルダーにジスクをセットします。
- (4) ジスクサイズ(厚み)に合わせて時間をセットし、ヒータースイッチ(ヒーターカバーをかける)を入れます。
- (5) 時間経過後、軟化したジスクを石膏模型台へ被せまします。
- (6) コンプレッサーからの吸引が開始し、軟化したジスクが模型の形状に変形をします。
- (7) ジスクを冷やし、模型からはずします。
- (8) 適度にジスクをトリミングし最終仕上げを実施します。

【使用上の注意】

- (1) 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
- (2) 加熱部分には十分注意して取り扱うこと。火傷をおった時は、速やかに医師の治療を受けること。
- (3) 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。
- (4) 必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
- (5) 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
- (6) 電源コードの過度の加熱を避けるため、ヒーターの電源をオフにしてからヒーターユニットを背面へ回転すること。
- (7) 熱による破損の恐れがあるもの(ガラス等)、可燃性があるものの側での使用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 名南歯科貿易株式会社

TEL 052-799-4075

FAX 052-353-6610

製造業者： SILADENT Dr Bohme & Schops GmbH
 ドイツ

取扱説明書を必ずご参照ください