

バープラス

【警告】


1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。

【禁忌・禁止】

- 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
- 使用ハンドピースに正しく装着、固定しないときは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品はシャンク (FG 用) 付のカーバイドバーで未滅菌である。
2. 主な構成と主原料

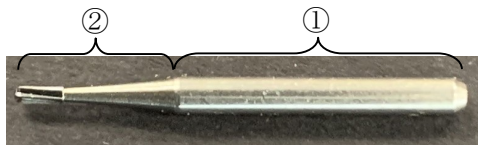

- ① 軸部: ステンレススチール製
- ② 切削先端部: タングステンカーバイド製

【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに装着して、天然歯及び歯科用補綴物を研削・形成する時に使用する。

性能: 推奨回転数 300,000rpm 以下
最大許容回転数 450,000rpm

【使用方法等】

歯科用高速ハンドピース等に装着して、指定の回転数の範囲内で、フェザータッチにて被研削物に、断続的に押し当てて研削、形成に使用する。

【使用上の注意】

1. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
2. シャンクは確実にハンドピースの奥部まで挿入し、中途半端な半チャックの状態でないことを確認すること。
3. 使用前に口腔外で予備回転を行い、揺れが無いことを確認すること。
4. 無理な角度、過度の圧力を加えて使用しないこと。
5. 決められた使用回転数を超えて使用しないこと。
6. 感染防止の為、防護グローブ、保護マスク、保護メガネを着用すること。
7. 削合は、発熱防止、歯髄損傷防止の為、必ず注水下にて行うこと。
8. 使用後は、速やかに本品に付着した、体液、生体組織の異物を完全に洗い落とし、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。
9. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。
10. 本品の使用は、免許を持った歯科医療従事者のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
 11. 落下・誤飲に注意すること。
 12. 単回使用

【保管方法及び使用期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: Ningbo Sinyuan Bur&Tool Co., Ltd 社
中華人民共和国