

医 04 整形用品  
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 JMDN コード:70914000

## コンビロックプラス

### 【禁忌・禁止】

1. 歯科用以外の用途には使用しないこと。
2. 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



形状：丸型・角型  
硬質・軟質の二重層プレート

#### 2. サイズ

サイズ	125 × 125mm 丸型：120mm
厚さ	2.0/3.0 mm
カラー	透明

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的・用途

転位歯又は動揺歯の位置の保持、クレンジングや歯ざしりとその後後遺症の治療、及び筋肉又は顎関節の疼痛、顎関節症に対する暫間的な除痛に使用。

### 【性能及び安全性に関する規格】

#### 主成分

硬質側：PET-G ポリエチレンテレフタレート

軟質側：EVA エチレン酢酸ビニル共重合樹脂

### 【使用方法等】

1. 歯科技工用成形器のジスクホルダーへ本材をセットして、ヒータで加熱します。
2. 歯科技工用成形器の成型部に石膏模型をセットします。
3. 本材が軟化されて石膏模型にセットされ、成形されます。
4. 本材から石膏模型を外します。

※歯科技工用成形器によって、成形方法が変わります。  
各社成型器の使用説明書に従って、ご使用ください。

### 【使用上の注意】

1. 本材は製作中、高温になるので火傷等に注意すること。
2. 本材の薄い板は、角等で指を切る恐れがあるため、注意すること。
3. 使用する加熱吸引成型器の添付文書、あるいは仕様説明書を熟読したあと、正しく器具に装着すること。
4. 使用する前に、当材料に変形、ゆがみ、かび等の異常がないことを確認してから使用すること。
5. 歯科用以外の用途には使用しないこと。
6. 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 本材は、湿気の無い場所にて密閉した状態にて保管すること。
2. 直射日光の当たる場所は避けること。
3. 児童の手の届かない場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 名南歯科貿易株式会社

TEL 052-799-4075

FAX 052-353-6610

製造業者： SILADENT Dr Bohme & Schops GmbH  
ドイツ