

デュアルアナログ

【禁忌・禁止】

- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・本品は模型上で使用するものであり、口腔内ではしないこと。

【形状・構造及び原理等】

ラボアナログ

ZMD：13810・14810・16010
 NBD：13610・14110・15110・23610・24310・25010
 SMD：13310・14110・24010E・26510E
 ATD：13010・13610・14510
 DSD：13010・13410・13810・14510・15510

ZMD	
NBD	
SMD	
ATD	
DSD	

材質：SUS（ステンレス鋼）

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料。

【使用方法】

- (1) インプラントの印象を採取します。
- (2) 採取し模型製作後、図1のように技工用ラボアナログを取付、スキャンボディを取り付けます。



図1

【使用上の注意】

- (1) 本品が破損している場合は使用しないで下さい。
- (2) 本品は指定された適用のみに使用し、他の目的に使用しないでください。
- (3) 本品は改造しないでください。
- (4) 繰り返し使用は可能ですが、再使用時に破損が確認された場合は使用を避けてください。

【保管方法及び有効期間等】

変形の恐れがあるため、高温多湿を避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：E-Pros

大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください