

歯 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

アシガ デンタトライ

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造



【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

専用の3Dプリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、主に個人トレー作成に用いる。

【性能及び安全性に関する規格】

主成分: アクリル樹脂・メタアクリル樹脂とその他物質との混合物

カラー: ホワイト

【使用方法等】

1. 専用3Dプリンターへ樹脂をセットします。
※専用トレーへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューターCAD上で設計されたデザインを3Dプリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 樹脂を直接皮膚に触れないようすること。皮膚刺激・アレルギー性皮膚反応・を引き起こす可能性があります。
4. 直接目に入れないように注意すること、目に障害を引き起こす可能性がございます。
5. 呼吸器に入ってしまった場合、呼吸器刺激を引き起こす可能性がございます。
6. 本材は単回使用である。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
本容器蓋はしっかりと締めること。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
4. 保管温度: 5~40度

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

住 所: 〒454-0805

名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

外国製造業者: ASIGA社

製造先国名: オーストラリア