

フラップホールディングプライヤー

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ステンレス 1.4021 (SUS420J1)

3. 仕様

寸法: 長さ 145mm ± 4 / ホールド部外寸 14.5mm
内寸 9.5mm

重量: 15.0g

【使用目的又は効果】

保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセット及び手術用ツイーザーが含まれる。主にインプラント骨増生手術の際、フラップを掴むために使用する。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。
3. ハンドル部を保持し、先端部を閉じることで対象物を保持する。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌した商品は化学薬品を避けて埃のない清潔で乾燥した場所で保管してください。

一定の温度で直射日光を避け保管してください。

【保守・点検に係わる事項】

[滅菌]

圧力: 最低60ミリバール

温度: 最低134℃ 最高137℃

最短保持時間: 4分

乾燥: 最低10分

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、その後、滅菌処理を実施し、しっかりと乾燥されたことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
ドイツ