

フロントサーフェスマラー

【警告】

1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

1. 次亜塩素ナトリウム・塩化ベンザルコニウムホルマリン等は、鏡面・金属の腐食の原因となるため、使用しないこと。
2. 家庭用洗剤、磨き粉、金属ウール、金ブラシは、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
3. 超酸化水(超酸性水)は、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
4. 超音波洗浄器による洗浄は鏡面が剥離するため、使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



ミラーヘッド

二次残像の出ない表面反射式ミラー。
国産ミラーホルダー形状のネジきり。

材質: ステンレス
コーティング: クロム
反射率: 84.0%

【使用目的又は効果】

口腔内で歯を見るために用いる歯科用鏡。ゴースト(二次残像)の出ない表面反射式ミラーとなっているため、くっきりとしたシャープな像が見られる。

【使用方法等】

1. 器具のめくれ、割れ・鏡面のキズ等の破損がないことを確認する。
2. 柄の部分を持ち、ミラーヘッド部分を口腔内に入れて歯を見る。

【使用上の注意】

1. 使用後は、精製水を用いて器具に付着した、血液等を速やかに除去すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌は、できるだけ精製水を使用すること。
3. 薬液を用いて消毒を行うときには、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を厳守すること。
4. 加熱滅菌器(オートクレープ滅菌器)を使用する時は、メーカーの取扱説明書に準じて正しく行うこと。
5. 水分が付着したまま長時間放置すると、シミ・変色等の原因となるため、洗浄・消毒・滅菌後の器具は、水分を十分に除去し、乾燥、保管すること。

【各種滅菌法条件】

- オートクレープ: 131°C/60~70min (MAX:131°C)
- 乾燥: 121°C
- 煮沸: 95~97°C
- 薬品: アルコール

【保管方法及び有効期間等】

1. 器具は、風通しの良い湿度の少ないところに保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: パノラマインターナショナル社
PANORAMA INTERNATIONAL
パキスタン