

歯08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000


## アシガ デンタスタディ

### 【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理】

#### 1. 形状・構造

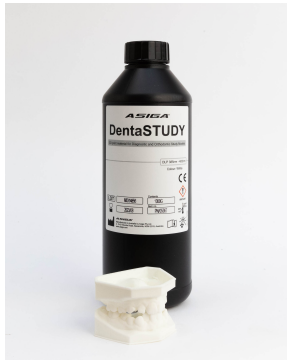

成分: アクリル酸エステル、光開始剤  
アクリラートモノマー、添加剤パッケージ混合物

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

専用の3Dプリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる。

### 【性能及び安全性に関する規格】

カラー: ホワイト

1本: 1000ml

### 【使用方法等】

1. 専用3Dプリンターへ樹脂をセットします。  
※専用トレイへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューターCAD上で設計されたデザインを3Dプリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

### 【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
4. 本材は単回使用である。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5. 使用期限: 製造年月日より2年

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社  
TEL: 052-799-4075/FAX: 052-353-6610

外国製造業者: ASIGA社  
製造先国名: オーストラリア