

器 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 JMDNコード:35812000

コーラー エクスプローラー

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ハンドル:ピーク材 / 先端:SUS420J2 (DLC コーティング有)

3. サイズ

・167±2 mm

・174±2 mm

【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具(プローブ)をいう。軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、又は鈍的形状のものがある。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無がないことを確認する。
3. 先端部を使い触診等に用いる。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

＜オートクレーブ＞

温度:134～137℃

4 分以上

乾燥 10 分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

T E L : 052-799-4075

F A X : 052-353-6610

製造業者：コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG

ドイツ