

コーラー サーフェスマirror

【警告】

- 使用目的に応じて使用すること。
- 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

- 次亜塩素ナトリウム・塩化ベンザルコニウムホルマリン等は、鏡面・金属の腐食の原因となるため、使用しないこと。
- 家庭用洗剤、磨き粉、金属ウール、金ブラシは、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
- 超酸化水(超酸性水)は、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
- 超音波洗浄器による洗浄は鏡面が剥離するため、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状



- 材質

SUS304 / ロジウムミラー/ブラッククロム

【使用目的又は効果】

口腔内で歯を見るために用いる歯科用鏡。

【使用方法等】

- 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
- 器具のめくれ、割れ・鏡面のキズ等の破損がないことを確認する。
- 柄の部分を持ち、ミラーヘッド部分を口腔内に入れて歯を見る。

【使用上の注意】

- 使用後は、精製水を用いて器具に付着した、血液等を速やかに除去すること。
- 洗浄・消毒・滅菌は、できるだけ精製水を使用すること。
- 薬液を用いて消毒を行うときには、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を厳守すること。
- 加熱滅菌器(オートクレープ滅菌器)を使用する時は、メーカーの取扱説明書に準じて正しく行うこと。
- 水分が付着したまま長時間放置すると、シミ・変色等の原因となるため、洗浄・消毒・滅菌後の器具は、水分を十分に除去し、乾燥、保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

器具は、風通しの良い湿度の少ないところに保管する。

<オートクレープ>

温度: 134~137°C

4分以上

乾燥 10分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohler Medizintechnik GmbH

ドイツ