

器 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用エクスカベータ JMDNコード:35811000

コーラー エクスカベーター

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ハンドル:ピーク材 / 先端:SUS420J2 (DLC コーティング有)

3. サイズ

155±3 mm

【使用目的又は効果】

う歯の齲蝕象牙質の切断及び除去のために用いる、カーブのついた切刃をもつ手持型歯科用器具。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無がないことを確認する。
3. 先端部を使い触診等に用いる。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

＜オートクレーブ＞

温度:134～137℃

4 分以上

乾燥 10 分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者:コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co.KG

ドイツ