

コーラー ミラーホルダー

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ピーク材 / SUS420J2

3. サイズ

125±2 mm

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は下・粘膜等の圧排を目的とする、歯科用器具。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、動きなどに異常がないことを確認する。
3. ミラーを装着し、通法に従い操作する。

【使用上の注意】

1. 患者ごとに洗浄・滅菌を行う。
2. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄。消毒する事。
3. 本品は歯科医療有資格者以外使用しない事。
4. 本品は精密機器につき、粗雑な取り扱いをしない事。
5. 本品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は速やかに使用を中止する事。
6. 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに清拭する事。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避け、チリやほこりのない清潔な場所に保管する事。
- ・金属電位差を要因としたガルバニック腐食を防ぐ為、材質の異なる器具と一緒に保管しない事。
- ・変形の原因となるので、トレイ、コンテナによる移動および保管は丁寧に行う事。なお、トレイやコンテナを使用する際は思い器具を載せない事。
- ・錆がある器具と一緒に保管しない事。また、化学薬品と一緒に保管、収納しない事。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認する事。

<オートクレーブ>

温度: 134~137℃

4分以上

乾燥 10分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG

ドイツ