

## コーラー ラバーダムフレーム

### 【形状・構造等及び原理等】

サイズ: W 115 mm x H 97 mm

材質:SUS303



### 【使用目的又は効果】

本品の使用によりラバーダムを延伸した状態で保持することができ、術野に到達しやすくなる。

柔軟なフレームであり、ラバーダム延伸した状態で保持が可能。

### 【使用方法等】

1. ラバーダムフレームの下にラバーダムを持っていけます。
2. シートの角にフレームを引っ掛けます。
3. ラバーダムフレームに沿わせるようにシートを伸ばします。
4. ラバーダムフレームのピンにシートを引っ掛けます。  
※ ピンがシートを貫通する必要はありません。
5. 反対側も同様にシートを引っ掛けます。
6. 側面の固定後に中央を引っ掛けます。
7. 最終的にフレームの側面から水漏れが防げるようにラバーダムを設置します。

### 【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- ・ 折損、曲がり等の原因になりえるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ・ 使用前に必ず洗浄・消毒・滅菌をすること。
- ・ 使用前に、傷等がないことを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 「もらい錆」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。また、化学製品と一緒に収納・保管しないこと。
- ・ 長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ・ 水分及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

### 【保守・点検に係わる事項】

- ・ 使用・滅菌前に、汚れ、傷、曲がり等、異常がないか点検すること。
- ・ 洗浄・消毒・滅菌を行うこと(オートクレーブ可 134～137℃で4分間以上、乾燥 10 分以上)
- ・ 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・ 使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部の傷大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

T E L : 052-799-4075

F A X : 052-353-6610

製造業者：コーラー社

Kohler Medizintechnik GmbH

ドイツ