

スリムネック両面ミラー

【警告】

- 使用目的に応じて使用すること。
- 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

- 次亜塩素ナトリウム・塩化ベンザルコニウムホルマリン等は、鏡面・金属の腐食の原因となるため、使用しないこと。
- 家庭用洗剤、磨き粉、金属ウール、金ブラシは、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
- 超酸化水（超酸性水）は、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
- 超音波洗浄器による洗浄は鏡面が剥離するため、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 主な構成

表面



裏面



ミラーヘッド

国産ミラーホルダー形状のネジきり。

材質：ステンレス

コーティング：クロム

反射率：84%

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。

【使用方法等】

- 器具のめくれ、割れ・鏡面のキズ等の破損がないことを確認する。
- 柄の部分を持ち、ミラーヘッド部分を口腔内に入れて歯を見る。

【使用上の注意】

- 使用後は、精製水を用いて器具に付着した、血液等を速やかに除去すること。
- 洗浄・消毒・滅菌は、できるだけ精製水を使用すること。
- 薬液を用いて消毒を行うときには、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を厳守すること。
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器）を使用する時は、メーカーの取扱説明書に準じて正しく行うこと。
- 水分が付着したまま長時間放置すると、シミ・変色等の原因となるため、洗浄・消毒・滅菌後の器具は、水分を十分に除去し、乾燥、保管すること。

【各種滅菌法条件】

- オートクレーブ：最大 131°C/60~70 分
- 乾燥：121°C
- 煮沸：95~97°C
- 薬品：アルコール

【保管方法及び有効期間等】

器具は、風通しの良い湿度の少ないところに保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：パノラマインターナショナル社

PANORAMA INTERNATIONAL

パキスタン