

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDNコード：34811000

キーモデルウルトラ

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



【使用目的又は効果】

1. 使用目的

専用の 3D プリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、主に模型作成に用いる。

主成分：脂肪族ウレタンアクリレートオリゴマー
カラー：アイボリー、ライトグレー

【使用方法等】

1. 専用 3D プリンターへ樹脂をセットします。
※専用トレイへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューターCAD上で設計されたデザインを 3D プリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
4. 本材は単回使用である。
5. 使用前に 5 分程ボトルを振ること。
6. 積層前にレジン温度を常温（20～25 度）に保つこと。
7. IPA で洗浄する場合、洗浄時間は 5 分以内に設定すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
本容器蓋はしっかりと締めること。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1 つの保管庫に大量に保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5. 涼しく乾燥した光の当たらない場所で保管すること。
6. 保管温度：15～30 度
7. 使用期間：製造より 2 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社
TEL：052-799-4075
FAX：052-353-6610

製造業者：キーストンインダストリーズ社
KEYSTONE Industries
アメリカ合衆国