

キースプリント

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



	カラー	主成分
キースプリントソフト	クリア	メタクリル酸 2-フェノキシエチル
キースプリントハード	クリア	メタクリル酸 2-フェノキシエチル

※主成分には、メタクリレートモノマーおよびオリゴマーを含む。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

専用の 3D プリンターを用いてデザインされたデータを具現化するための材料で、主に歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料。（使用期間が 30 日を超えないものに限る。）

【使用方法等】

1. 専用 3D プリンターへ樹脂をセットします。
※専用トレイへ樹脂を流し込みます。
2. コンピューター CAD 上で設計されたデザインを 3D プリンター装置へ転送します。
3. 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。
4. プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。
5. 積層物を洗浄し、乾燥させます。
6. 乾燥後、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は単回使用である。
4. 樹脂の均一性を保ち、気泡を防ぐため使用の 1 時間前にボトルを振ってください。気泡がある場合は、清潔な器具（ヘラで取り除いてください）
5. メーカー適合検証済みの 3D プリンターと光重合器のみ使用ください。
6. 3D プリンターは 385nm～405nm 波長のものをご使用ください。
7. 光重合器は UV 波長 250nm～390nm のものをご使用ください。
8. 積層前に樹脂が室温（20～25 度）に適した温度になっていることを確認してください。
9. 積層完了後、約 8 時間以内に IPA（約 97% 濃度）で積層物に残った残留樹脂を洗浄してください。
10. IPA で洗浄する場合、清掃物を 5 分以上 IPA 液内に浸漬しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
本容器蓋はしっかりと締めること。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
4. 保管：冷暗所（15～30℃） 光から遠ざけてください。
5. 使用期間：製造より 3 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社
TEL： 052-799-4075
FAX： 052-353-6610

製造業者：キーストンインダストリーズ社
KEYSTONE Industries
アメリカ合衆国