

器 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN コード:35170000
W/H マンドレル

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った者以外は使用しないこと。
2. 本来の使用目的以外に使用しないこと。
3. 本品に対して感作またはアレルギーの症状の既往がある者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 成分

低炭素鋼、真鍮

【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するために使用する。軸部、ヘッド部の形状によって数種類存在する。

【使用方法等】

1. 清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
3. ハンドピースに装着して使用する。

【使用上の注意】

1. 落下に注意すること。
2. 損傷、変形、劣化、錆びが認められた場合は使用しないこと。
3. 装着するハンドピースの回転数を厳守し、決してそれ以上の回転数で使用しないこと。ただし、個別に表示・指定されている製品については、その表示された最大回転数を超えないこと。
4. 装着時は器具メーカーの指示に従い、底部まで確実に挿入し、正しくチャックを締めること。
5. あらかじめ回転させ、異常やブレがないことを確認すること。
6. 口腔内では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

- 使用後は、付着した異物を完全に洗い落とすこと。
- 家庭用洗剤や機能水（超酸化水）等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 名南歯科貿易株式会社

TEL 052-799-4075

FAX 052-353-6610

製造業者： ウーハン社
中国