

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN コード:32692000

エルゴヴィスタ

【禁忌・禁止】

1. 太陽や強力な光源を直視しないこと。(視力障害になる可能性があるため)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



〈セット内容〉

- ・ 本体
- ・ LED ライト
- ・ 充電スタンド
- ・ 充電ケーブル
- ・ バッテリー
- ・ 充電アダプター

2. 原理

眼鏡レンズ部又は、眼鏡フレーム部に装着したルーペを通して作業野を拡大して観察する。

固定倍率	3 倍、4 倍、5 倍、6 倍
作業距離(WD)	460 mm、520 mm、560 mm
電源・電圧	AC-110V/240V、50/60Hz
色温度	6,000K
ライト照度	15,000～30,000 ルクス

【使用目的又は効果】

歯科手術、検査、処置及び歯科技工作業時に術者の小型望遠鏡として機能し、作業野拡大像を得られる。

【使用方法等】

1. ストラップを頭の後ろで締めて固定する。
2. 装着感を確認し、ズレがないようにフィットさせる。
3. 高さ、瞳孔間を調整する。
4. 補綴物などを利用し、焦点を合わせ、作業距離を確認する。

ライトを使用する場合は装着する前に以下を行う。

1. バッテリーを充電する。
2. LED ライトを本体へ取り付ける。
3. 充電したバッテリーを LED ライトへ取り付ける。
※ライトは自動的に点灯する。

【使用上の注意】

- 取扱説明書を必ず参照すること。
- テレスコープ・ルーペは推奨ものを使用すること。
- ワイヤレス LED ライトは使用後しばらく熱を持つためライト部分に触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
- 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 使用しないバッテリーは必ずアタッシュケースに入れて保管すること。
- 耐用年数：5 年

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 名南歯科貿易株式会社

TEL 052-799-4075

FAX 052-353-6610

製造業者： Ymarda Optical Instrument Factory
中国

取扱説明書を必ずご参照ください。