

メディキットドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

*<使用方法>

- ・再使用禁止

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 東郷メディキット株式会社
住所: 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川17148-6
電話番号: 0982-53-8000

販売業者: メディキット株式会社
住所: 〒113-0034 東京都文京区湯島1丁目13番2号
電話番号: 03-3839-0201


*【形状・構造及び原理等】

吸水性又は撥水性を有することにより、手技時の汚染または感染防止を高める。

**<ドレープ構造>

構造	構成
単層	不織布、もしくは透明フィルム
二層	不織布+ラミネートフィルム
三層	不織布+ラミネートフィルム+不織布

*<外観図>(代表図)

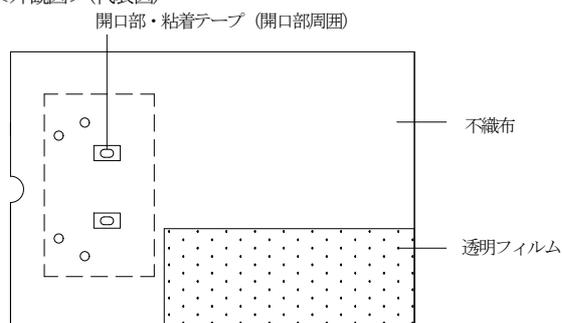

開口部、粘着テープ、透明フィルムの無いものもある。

** 本品はポリエチレン、ポリエステル、アクリル系粘着剤等を使用している。

**【使用目的又は効果】

手技時に患者を覆い、切開部位や術野を確保するとともに、汚染または自己感染を防止するための保護的なカバーとして用いる用具である。

*【使用方法等】

1. 本品を使用直前に滅菌袋から取り出す。
2. 無菌的に展開し、患者または対象物を覆う。
3. 開口部を有する場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、固定用の粘着テープ等で固定する。

【使用上の注意】

*<重要な基本的注意>

本品の粘着テープが濡れた皮膚や創傷面に付かないようにすること。

*【保管方法及び有効期間等】

*<保管方法>

水濡れに注意し、紫外線(直射日光・UV殺菌灯など)や高温多湿を避けて保管すること。

*<有効期間>

包装の使用期限を参照[自己認証による]

