

【使用目的又は効果】

歯牙及び歯科補綴物の切削、研削及び研磨

【使用方法等】

通常の方法により、歯質の状態・形状に合わせて適宜にバーを選択し使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、表示使用回転数を厳守すること。
- 2) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 頭部の形状が細いもの、長いもの、大きいものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 5) 歯髄為害防止のため、注水下でソフトタッチで断続的に使用すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 1) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 再使用する際には、洗浄液、消毒液を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブ又は EOG による滅菌若しくは薬剤による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤は使用しないこと。また、洗浄液・消毒液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。
- 3) 眼の損傷を防ぐために保護めがね等を着用すること。その他必要に応じて保護対策をとること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、物理的負荷及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： アグサジャパン株式会社

住 所： 大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 34 号

電話番号： 06-6768-6344

製造業者（バー）： バネッティ社 VANETTI SA

製造国： スイス

製造業者（小分け・包装）： アグサジャパン株式会社