

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

ブルーセンサーキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

使用方法

本品は、ディスプレイ製品ですので再使用できません。
併用医療機器
MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがある
ので使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】**

ブルーセンサーキット構成内容

本品は、以下の構成品のうち 2 品目以上を組み合わせで構成します。

	構成品名	一般的名称	型式
1	ブルーセンサー	単回使用心電用電極	VL/L/R
2	スキンフィックス	整形外科用テープ	2703/50
3	アルカリ電池	非医療機器	単 3 / 単 4
4	行動記録カード	非医療機器	—
5	ペグシル(鉛筆)	非医療機器	—
6	リムカ(ネームラベル)	非医療機器	ML-R7
7	リードフィックス	整形外科用テープ	LF-2040 LF-3090

ブルーセンサーキット標準型式

※下記標準型式以外の組み合わせをする場合もあります。

内容 型式	電極	スキンフィックス	アルカリ電池		行動記録 カード
	L-00-S	2703/50	種類	個数	
BK-52A341	5	2	単 3	4	1
BK-520341	5	2	単 3	4	1
BK-52A331	5	2	単 3	3	1
BK-520331	5	2	単 3	3	1
BK-52A321	5	2	単 3	2	1
BK-52A421	5	2	単 4	2	1
BK-520321	5	2	単 3	2	1
BK-52A311	5	2	単 3	1	1
BK-52A411	5	2	単 4	1	1
BK-520311	5	2	単 3	1	1

※ペグシルは全ての型式に同梱

原材料:

ブルーセンサー: ウェットゲル、銀/塩化銀処理純銀テープ
スキンフィックス: ポリエステル不織布、アクリル接着剤
リードフィックス: ナイロン不織布、アクリル酸エステル

【使用目的又は効果】

本品は、ホルター心電図測定時に使用する消耗品を組み合わせたキットで、
単回使用心電用電極、電極固定用又はリード線固定用の整形外科用テープ
及び電池等で構成されています。

【使用方法等】

- ① 装着部位をアルコール綿などで清拭し、よく乾かして下さい。
- ② 電極を袋から取出し、コネクタ裏側の接着面のタブを持って、プラスチックカバーを剥がして下さい。
- ③ 電極のコネクタ部が下向きになるよう皮膚面に軽くあて接着部の縁に沿ってしっかり固定して下さい。
- ④ 指先でコネクタ部を持ち上げてリード線を接続して下さい。
- ⑤ スキンフィックス又はリードフィックスを使用し、リード線を固定してください。
- ⑥ モニタの取扱説明書に従って、電池等を使用してください。

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあります。
このような場合は、使用を中止して下さい。
- 開封後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止に努め、早めに使用して下さい。
- 同梱されている電池等備品の使用は、モニタの取扱説明書を参照して下さい。

相互作用 (他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

【併用禁忌】(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	使用禁止	誘導起電力による発熱で熱傷を負うことがある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度範囲: 10℃～25℃

使用期限は、袋の使用期限を参照下さい。[自己認証 (当社データ) により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者及び製造業者: 株式会社メッツ
TEL: 03-3888-8445