

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

ブルーセンサータブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】*

使用方法

本品は、ディスポーザブル製品ですので再使用できません。

【形状・構造及び原理等】**

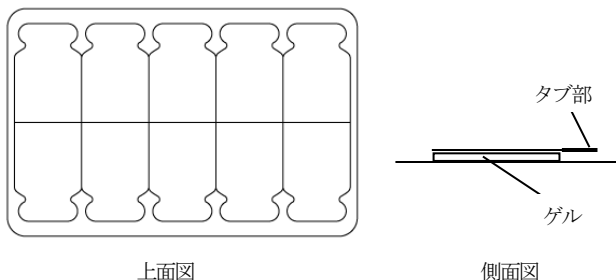

型 式	電極寸法 [mm]	センサ	ゲル
BS-TAB-2300/100	34×23	銀／塩化銀	ソリッドゲル

原材料：

センサ：銀／塩化銀

バックینگ：ポリエステル

【使用目的又は効果】**

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動等をグラフで表示する）に伝達する導体です。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。

本品は単回使用です。

【使用方法等】

- ① 装着部位をアルコール綿などで清拭し、よく乾かして下さい。
- ② 電極を袋から取出し、電極のタブ部を持って、ライナーから剥がして下さい。
- ③ 電極のタブ部が下向きになるよう皮膚に貼り付け、接着部を皮膚に密着させて下さい。
- ④ タブ部を鰐口クリップなどでしっかり接続して下さい。

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあります。
このような場合は、使用を中止して下さい。
- 開封後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止に努め、早めに使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度範囲：5℃～30℃

使用期限：

使用期限は、電極袋の使用期限を参照下さい。

製造日から 24 ヶ月以内 [自己認証（当社データ）により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社メッツ

製造業者・国名：

Ambu A/S・Denmark

アンブ・デンマーク