

機械器具(21) 内臓機能検査用器具

一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000（頭皮脳波用電極 11440001）

ブルーセンサーSW

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

使用方法

本品は、ディスプレイ製品ですので再使用できません。


併用医療機器

MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。

【使用方法等】*

- ① 装着部位をアルコール綿などで清拭し、よく乾かして下さい。
- ② 電極を袋から取出し、コネクタ裏側の接着面のタブを持って、プラスチックカバーを剥がして下さい。
- ③ 電極のコネクタ部が下向きになるように皮膚面に軽くあて接着部の縁に沿ってしっかり固定して下さい。
- ④ 指先でコネクタ部を持ち上げてリード線を接続して下さい。

【形状・構造及び原理等】*

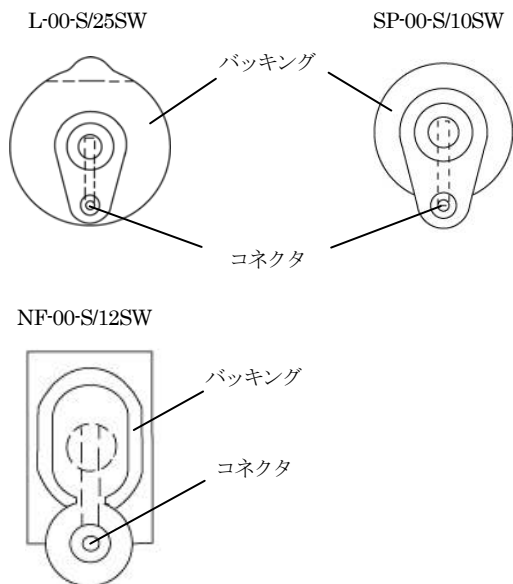

型式	電極寸法 [mm]	バッキング	コネクタ
L-00-S/25SW	68.2×55	細孔紙	S
SP-00-S/10SW	42.5×38	フォーム	S
NF-00-S/12SW	44.3×22	不織布	S

コネクタタイプ S：スナップ

原材料：

センサー：銀/塩化銀処理純銀テープ

ゲル：ウェットゲル（L及びSP）、ソリッドゲル（NF）

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあります。このような場合は、使用を中止して下さい。
- 開封後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止に努め、早めに使用して下さい。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）

【併用禁忌】（併用しないこと）

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 機器)	使用禁止	誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負うことがある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度範囲：10℃～25℃

使用期限：

製造から24ヶ月以内 [自己認証（当社データ）により設定]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社メッツ

TEL：03-3888-8445

製造業者・国名：

Ambu A/S・Denmark

アンブ・デンマーク

【使用目的又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動をグラフで表示する）に伝達する導体です。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。本品は脳波計でも使用することができます。本品は単回使用です。