

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 頭皮脳波用電極 11440001

ニューロライン皿電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法
本品は、ディスポーザブル製品ですので再使用できません。

併用医療機器
MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

製品外観



型式	リード線長	リード線の色
726 10-M/10	100cm	10 色／1 袋 (黒、灰、茶、緑、白、 黄、橙、赤、紫、青)
726 15-M/10	150cm	
726 20-M/10	200cm	

コネクタ：1.5mmDIN コネクタ

原材料

電極：銀/塩化銀、ABS 樹脂
リード線：銅錫メッキ、PVC (被覆)

【使用目的又は効果】

頭皮において、脳の様々な領域の電位変化を記録する導体です。
本品は誘発電位も測定できます。この電気活動を記録する一般的
な装置は、脳波計 (EEG) です。本品は単回使用です。

【使用方法等】

- ① 電極の装着部位を決定します。
- ② アルコール綿等を使用して電極装着部位をよくこすり、皮膚の
脂肪分を除去します。
- ③ 導電性ゲル又はペーストを塗布します。
- ④ 本品を装着部位に取付けます。
- ⑤ 本品の上からガーゼ等をのせ、固定します。
- ⑥ 本品のコネクタを装置へ接続します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあり
ます。このような場合は、使用を中止して下さい。

相互作用（併用禁忌・禁止：併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断 装置 (MRI 装置)	使用禁止	誘導起電力によ る発熱で患者が 熱傷を負うこと がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

水濡れに注意し、直射日光のあたる場所をさけて保管温度内で
保管して下さい。

保管温度範囲：10℃～40℃

使用期限：

製造から 24 ヶ月以内 [自己認証 (当社データ) により設定]
使用期限は、袋の使用期限を参照下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メッツ

TEL：03-3888-8445

製造業者・国名：

Ambu A/S・Denmark
アンプ・デンマーク