

機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具
管理医療機器 筋電計電極 11441002

ニューロライン筋電図用針電極

再使用禁止


【禁忌・禁止】
＜使用方法＞

- ・ 本品はディスプレイ製品(滅菌品)ですので再使用できません。
- ・ 本品を使用して電気刺激を行わないでください。

＜併用医療機器＞ 「相互作用の項参照」

- ・ 電気手術器（電気メス）、MRI 装置、除細動器との併用は、熱傷の原因となる恐れがありますので、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】**

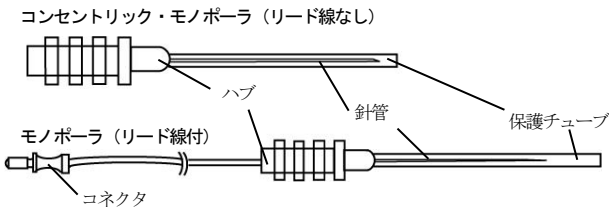

製品規格

コンセントリック	モノポーラ	針長 L [mm]	針径		ハブの色
			[mm]	ゲージ	
740 25-30/25		25	0.30	30G	ライトグレー
	742 25-36/40	25	0.36	28G	ダークグレー
	743 25-36/40	25	0.36	28G	ダークグレー
740 25-45/25		25	0.45	26G	ダークグレー
740 30-35/25		30	0.36	28G	パープル
	742 38-36/40	38	0.36	28G	ライトグリーン
	743 38-36/40	38	0.36	28G	ライトグリーン
740 38-45/25		38	0.45	26G	グリーン
	742 38-45/40	38	0.45	26G	グリーン
	743 38-45/40	38	0.45	26G	グリーン
740 50-45/25		50	0.45	26G	イエロー
	742 50-45/40	50	0.45	26G	イエロー
	743 50-45/40	50	0.45	26G	イエロー
	742 75-50/40	75	0.50	25G	レッド
	743 75-50/40	75	0.50	25G	レッド
740 75-65/25		75	0.64	23G	レッド

743****：リード線付タイプ

中継ケーブル（以下の中継ケーブルを使用してください）

型式	長さ	コネクタ	用途
1741	100cm	DIN 5p コネクタ付	コンセントリック
1742	200cm	DIN 5p コネクタ付	コンセントリック
1744	76cm	1.5mmDIN コネクタ	モノポーラ

適用機種：本品はリード線付タイプ又は中継ケーブルを使用して、筋電計に接続します。

原材料

針管：ステンレススチール コーティング：シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は中枢神経を除く神経組織又は筋肉に挿入し、神経組織又は筋肉の活動電位を検知するための針電極です。

【使用方法等】

コンセントリック：

- ① 患者（被検者）の皮膚表面上の汗、皮脂、垢等をアルコール綿などで清拭し、よく乾燥させてください。
- ② 滅菌袋を開封し、本品を取り出してください。
- ③ 本品専用の中継ケーブルを接続してください。
- ④ 中継ケーブルを装置に取り付けてください。
- ⑤ 保護チューブを取り外してください。
- ⑥ 針電極の針を被検筋に刺入し、筋電計を作動して筋電計の記録用紙に記録してください。
- ⑦ 被検筋から針を抜き、使用施設内の規則に従って廃棄してください。

モノポーラ：

- ① 患者（被検者）の皮膚表面上の汗、皮脂、垢等をアルコール綿などで清拭し、よく乾燥させてください。
- ② 滅菌袋を開封し、本品を取り出してください。
- ③ 本品専用の中継ケーブルを接続してください。（リード線無しの場合）
- ④ リード線コネクタ又は中継ケーブルを装置に取り付けてください。
- ⑤ 保護チューブを取り外してください。
- ⑥ 針電極の針を被検筋に刺入し、筋電計を作動して筋電計の記録用紙に記録してください。
- ⑦ 被検筋から針を抜き、使用施設内の規則に従って廃棄してください。

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用してください。
- 針先部には、直接手を触れないでください。
- 使用後は感染防止に配慮し、医療廃棄物として使用施設内の規則に沿って廃棄してください。
- 再利用及び再滅菌しないでください。
- 挿入時に針を曲げないでください。

<相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）>

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	検査室に本品を持ち込まないこと。MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力による発熱で熱傷を負うことがある。
電気手術器 (電気メス)	使用禁止	電流密度が高いため、刺入部で熱傷を生じる恐れがある。
除細動器		

【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

保管温度：10℃～25℃

使用期限：

使用期限は箱、袋に記載しています。[自己認証（外国製造業者データ）により設定]

使用期限：製造日より3年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メッツ

TEL：03-3888-8445

製造業者・国名：

Ambu A/S ・Denmark

アンブ社・デンマーク