

機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具
管理医療機器 筋電計電極 11441002
ニューロライン イノジェクト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


- 本品はディスポーザブル製品（滅菌品）ですので再滅菌及び再使用はできません。
- 本品を使用して電気刺激を行わないでください。

＜併用医療機器＞ 「相互作用の項参照」

- 電気手術器（電気メス）、MRI 装置、除細動器との併用は、熱傷の原因となる恐れがありますので、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

外観図

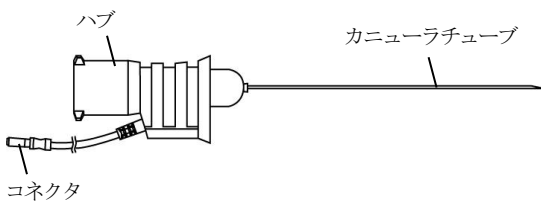

製品規格

型式	針長 L [mm]	針径 R	ハブの色
		[mm]	
744 25-30/10	25	0.30	グレー
744 30-36/10	30	0.36	パープル
744 35-40/10	35	0.40	ブルー
744 38-45/10	38	0.45	グリーン
744 50-50/10	50	0.50	イエロー
744 75-55/10	75	0.55	レッド

適用機種：本品は1.5mmDINコネクタが接続できる機種に使用できます。

【使用目的又は効果】

本品は筋肉又は中枢神経を除く神経組織内に挿入し、生体電気信号を検知する。本品によって感知された生体電気信号を筋電計（EMG）で記録し、筋疾患を診断することを目的とする。また、本品は同定した部位に対して針を抜かずに薬液を注入することができる。

【使用方法等】

- 患者（被検者）の皮膚表面上の汗、皮脂、垢等をアルコール綿などで清拭し、よく乾燥させてください。
- 滅菌袋を開封し、本品を取り出してください。
- リード線コネクタを装置に取り付けてください。
- 保護チューブを取り外してください。
- 針電極の針を被検筋に刺入し、筋電計を起動して筋電計の記録用紙に記録してください。
- 薬剤を投与する場合は、本品のハブにシリンジを接続し、同定した部位に薬液を注入してください。
- 被検筋から針を抜き、使用施設内の規則に従って廃棄してください。

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用してください。
- 針先部には、直接手を触れないでください。
- 使用後は感染防止に配慮し、医療廃棄物として使用施設内の規則に沿って廃棄してください。
- 再利用及び再滅菌しないでください。
- 挿入時に針を曲げないでください。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	検査室に本品を持ち込まないこと。MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力による発熱で熱傷を負うことがある。
電気手術器（電気メス）	使用禁止	電流密度が高いため、刺入部で熱傷を生じる恐れがある。
除細動器		

【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度：10℃～25℃

使用期限：

使用期限は箱、袋に記載しています。

製造日より 3 年間 [自己認証（外国製造業者データ）により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メッツ

TEL：03-3888-8445

製造業者・国名：

Ambu A/S・Denmark

アンプ・デンマーク