

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材（JMDNコード：34654000）

ブレースプラス

再使用禁止

【警告】


- ・本品で胸部を固定する際、きつく締めすぎないこと。
- ・使用中痛みを感じた場合は直ちに使用を中止すること。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造等及び原理等】

<外観図>

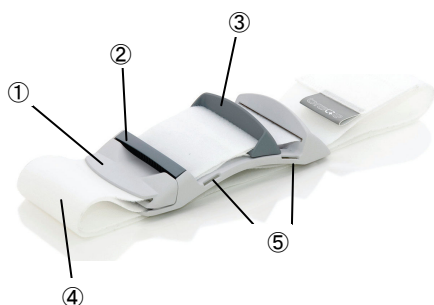


- ①バックル
- ②ブレーキ
- ③ハンドル
- ④ベルト
- ⑤ショルダーストラップ用孔

付属品：ショルダーストラップ

【使用目的、効能又は効果】

本品は胸骨切開手術後の創傷の保護及び固定をするために用いられる器具である。


【操作方法又は使用方法等】*

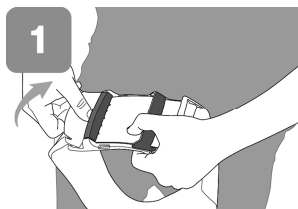


バックルを引き上げ、ベルトを外します。



ベルトを胸の周りに巻き、カチッというまで押し込みます。

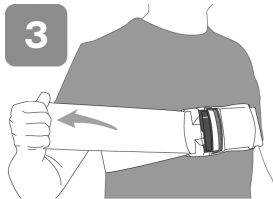

ベロクロ（マジックテープ）を使って長さを調節します。

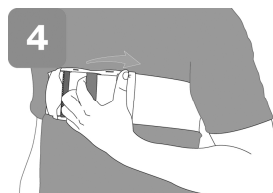

ハンドルをスライドさせることにより、ベルトを締めたり緩めたりすることができます。



ブレーキを操作することにより、ベルトを一時的に固定できます。

【使用上の注意】*

- ・本品は患者一人につき一台を使いきりで使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・高温多湿を避け、常温で保管すること。

【包装】

1台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：
株式会社名優
〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：
Patijnenburg（オランダ）