

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 吸引チューブ (JMDNコード: 16779000)

吸煙器用アクセサリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

1. 本品は、専用の吸煙装置（バッファローフィルター吸煙システム）以外と接続しないこと。

<使用方法>

1. 再使用および再滅菌禁止。
2. 本品は切断等の加工は一切行わないこと。

レーザー対応チューブ



【形状・構造及び原理等】

<形状> 一例

吸煙チューブ



ペンシルアダプター



チューブ接続用アダプター



【使用目的又は効果】

本品は、手術に伴い発生する煙を吸引するために、吸煙システムと共に使用されるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出し、吸煙システムのコネクターに接続する。
2. 吸煙システムの使用法等に関しては取扱説明書を参照すること。
3. 本品は単回使用の製品であり、使用後は適切な方法で廃棄すること。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. 使用中は本品を伸ばして、捻ったり折れ曲がらないようにすること。
2. 本品を使用して吸煙する際、先端を組織に接触させないように注意すること。

【使用上の注意】

<禁忌・禁止>

1. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
2. 本品を使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。

<重要な基本的注意>

1. 併用する吸煙システムの取扱説明書を必ず参照すること。
2. 医師および医師の指示を受けた医療従事者以外は使用しないこと。
3. フィルターやチューブが閉塞しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名優

住所： 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

電話番号： 047-480-6161

製造業者：Buffalo Filter, LLC.

(アメリカ合衆国)