

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDNコード：16779000）

バッファローフィルター アクセサリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

1. 本品は、専用の吸煙装置（バッファローフィルター吸煙システム）以外と接続しないこと。

＜使用方法＞

1. 再使用および再滅菌禁止。
2. 本品は切断等の加工は一切行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

一例



【使用上の注意】

＜禁忌・禁止＞

1. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
2. 本品を使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。

＜重要な基本的注意＞

1. 併用する吸煙システムの取扱説明書を必ず参照すること。
2. 医師および医師の指示を受けた医療従事者以外は使用しないこと。
3. フィルターやチューブが閉塞しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】*

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社名優

住所：千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

電話番号：047-480-6161

製造業者：Buffalo Filter, Division of Medtek Devices, Inc.
(アメリカ合衆国)

製品番号	製品名
PA1003	ペンシルアダプター [滅菌済]
VT38S1003	滅菌チューブ[滅菌済]
VTWT324X3	吸煙チューブ
VTWT805	延長チューブ[滅菌済]
WLRT303	レーザー対応チューブ
BLAP100	ラパロ用チューブ、バルブ無[滅菌済]
BLAP100V	ラパロ用チューブ、バルブ付[滅菌済]
PP012SE0	ラパロ用チューブ、バルブなし[滅菌済]

【使用目的又は効果】*

本品は、手術に伴い発生する煙を吸引するために、吸煙システムと共に使用されるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】*

1. 本品を包装から取り出し、吸煙システムのコネクターに接続する。
2. 吸煙システムの使用方法等に関しては取扱説明書を参照すること。
3. 本品は単回使用の製品であり、使用後は適切な方法で廃棄すること。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 使用中は本品を伸ばして、捻ったり折れ曲がらないようにすること。
2. 本品を使用して吸煙する際、先端を組織に接触させないように注意すること。