

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ（JMDNコード：32692000）

VISION X 双眼ルーペ

【禁忌・禁止】

レンズを通して太陽、光照射器、レーザー、光線、点灯させたライトなどの光源を直視しないでください。眼球に有害な影響を与える可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

<本体>



2. 原材料

接眼レンズのボディ	ALMgSi1 アルミニウム
接眼レンズのレンズ	ガラス
本体のレンズ	ポリカーボネート
本体のフレーム	HTPR シリコン
ノーズパッド・イヤerpッド	TR90 プラスチック

3. 原理

小型望遠鏡として機能するレンズを使用することにより、作業視野を拡大する。

【使用目的または効果】

小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像を得る。

【使用方法等】

1. 本体を装着する。必要に応じて付属の鼻パッドを付け替えたり、頭部固定用ストラップを使用する。
2. 拡大像を観察し、作業を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は経時変化や使用状況により、ネジの緩みや脱落、フレームの破断や変形、レンズの変色や変形などを起こす場合があるため、使用前に必ず緩み、可動部の異常、レンズの傷、汚れなどを点検し、安全を確認すること。
- ・使用中になんらかの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、点検を行うこと。必要に応じて弊社へ連絡すること。

- ・フレームが肌に触れる箇所で、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した時は、本品の使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・眼球等を傷つけないよう注意して装着すること。
- ・レンズを傷つけないよう注意して扱うこと。
- ・改造等を行わないこと。また、自ら修理を行わないこと。
- ・洗浄を実施する際は、頭部固定用ストラップなどのオプションパーツを外すこと。
- ・洗浄には流水のぬるま湯を用いること。
- ・洗浄剤を使用する場合、まず十分に流水のぬるま湯で洗い流した後、台所用洗剤やせっけん等の中性の洗浄剤を用いること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用しないこと。また、洗浄剤は流水のぬるま湯で十分洗い流すこと。
- ・浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- ・洗浄後は十分に乾燥させ、濡れたまま使用しないこと。
- ・洗浄後、消毒する場合は、アルコールを含まない消毒液を用い、やわらかい布やペーパータオルに消毒液を含ませて本品を拭くこと。スプレータイプの洗浄剤を本品に直接噴霧しないこと。
- ・本品は高圧蒸気滅菌をはじめとした滅菌プロセスに対応していない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

ほこり、水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161

FAX:047-480-6162

製造業者：

I.C.LERCHER-Solutions GmbH（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。