

機械器具 32 医療用吸引器 一般医療機器
吸引器用キャニスタ 34858000

ML 尿管アクセスシース 結石片収集ボトルセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

(形状)

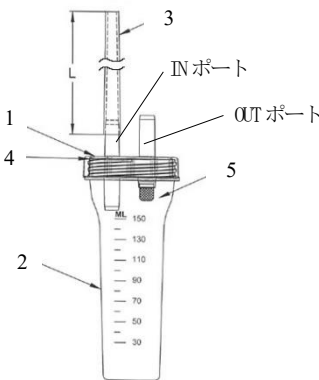

ボトル容量: 150 ml

L: 70 cm

1: フタ

2: ボトル

3: チューブ

4: シーリングリング

5: フィルターメッシュ

(原理)

本品は、アクセスシースと吸引器との間に接続することによって、結石細片等の組織を一時保管できる。

【使用目的又は効果】

本品は、体液、結石細片等の回収のため吸引器とともに使用するキャニスタをいう。尿管アクセスシースの吸引口と吸引器の間に接続し、吸引により回収された組織を一時保管するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 使用前の準備
 - 単回使用製品につき 1 回限りの使用とする。
 - 本品及び本品の包装に破損等の欠陥や開封の跡がないか確認し、発見した場合は使用しないこと。
- 使用中
 - 本品フタの IN ポートから伸びているチューブを別用意のアクセスシース(※)のポートに接続する。
 - 本品フタの OUT ポートを吸引器の接続チューブと接続する。
 - 吸引器をオンにし、吸引レベル・吸引速度を調節する。
 - ドレナージ終了後、吸引器をオフにし、IN ポートから伸びているチューブを外す。
 - 術後、ボトルから結石細片等の組織を採取する。

※併用医療機器

販売名	認証番号	一般的名称	製造販売業者
ML尿管アクセスシース	304AFBZX001 22000	尿管向け泌尿器用カテーテル	株式会社メディカルリーダース

3. 使用後

使用後は法令に則って適切に廃棄する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 本品は吸引圧を 10kPa～15kPa で使用すること。[適正值から逸脱すると、有効に作動しないおそれがある。]
- 過度に力を加えないこと。[本品の損傷や機能が保てなくなるおそれがある。]

【使用上の注意】

〈不具合・有害事象〉

本品は使用に際して、以下のような不具合・有害事象が考えられる。

- その他の不具合
 - 脱落
 - 破損
 - 変形
 - 漏れ
 - 吸引不良
- その他の有害事象
 - 感染

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
本品の移動や保管に際し、衝突や落下などの機械的衝撃にさらさず、乾燥し清潔で埃のない環境で保管すること。
- 有効期限
直接の包装に記載のとおり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社メディカルリーダース

TEL 03-5803-9271

外国製造業者:

イノベクスメディカル(中華人民共和国)

INNOVEX MEDICAL Co., Ltd.